




Forniture per l'industria alimentare e per l'agricoltura dal 1950

## BODYTEMP 478 – Termometro ad infrarossi per misure senza contatto

### Istruzioni brevi per la misura

#### Strumento

- 1- Sensore Infrarosso
- 2- Display LCD
- 3- Selezione Modalità Corpo- Superficie
- 4- Freccia giù
- 5- Freccia su
- 6- Pulsante Mode
- 7- Pulsante di misura
- 8- COmparto batterie

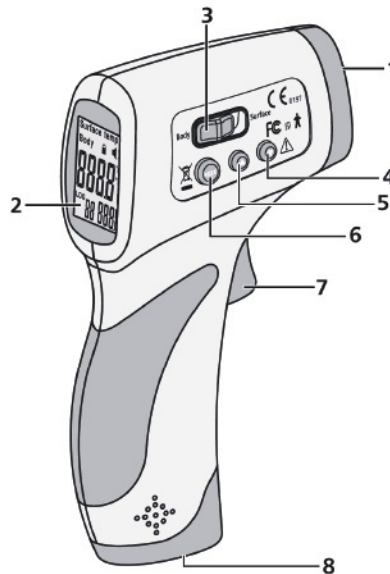

#### Display

- 1- Indicatore di superficie
- 2- Indicatore di corpo umano
- 3- Misura
- 4- Batterie
- 5- Numero registrazione
- 6- Valore registrato
- 7- Temperatura
- 8- Allarme acustico



#### Misura

1- Installare le batterie;

2- Alla prima accensione, o appena sostituite le batterie, consigliamo di **attendere 10 minuti di riscaldamento** prima di effettuare la misura;


3- Lo strumento all'accensione effettua un test sulla temperatura dell'ambiente, pertanto potrebbe ritardare la misura di qualche secondo;

4- **Puntare il termometro verso la fronte, ad una distanza di almeno 5 cm, e premere l'interruttore di misura.** La misura viene immediatamente mostrata a display.

Assicurarsi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il risultato.

5- Nel caso la temperatura dell'ambiente sia molto differente, o la fronte molto sudata, è possibile **misurare la temperatura nella parte posteriore dell'orecchio.**

Assicurarsi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il risultato.

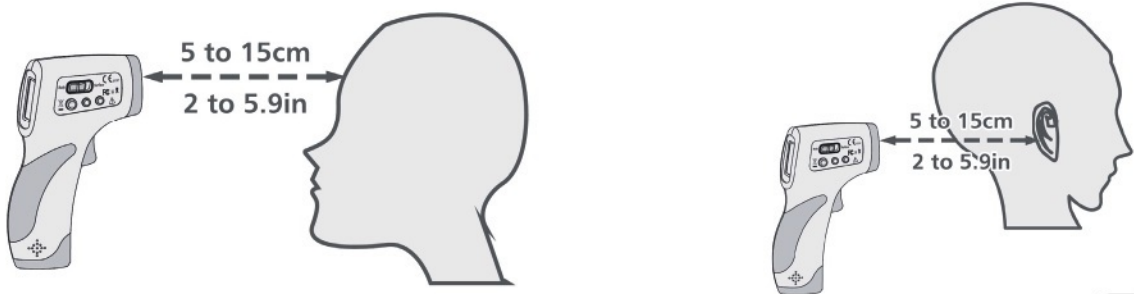

Le presenti istruzioni rapide sono state tradotte a partire dalle istruzioni originali di DOSTMANN Electronic GmbH che accompagnano lo strumento. In particolare trattasi dei capitoli nr. 5-6-10.


**FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI ORIGINALI PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO STRUMENTO**

# BODYTEMP

## Istruzioni brevi per la misura

### Strumento

- 1- Sensore Infrarosso
- 2- Display LCD
- 3- Selezione Modalità Corpo- Superficie
- 4- Freccia giù
- 5- Freccia su
- 6- Pulsante Mode
- 7- Pulsante di misura
- 8- COmparto batterie

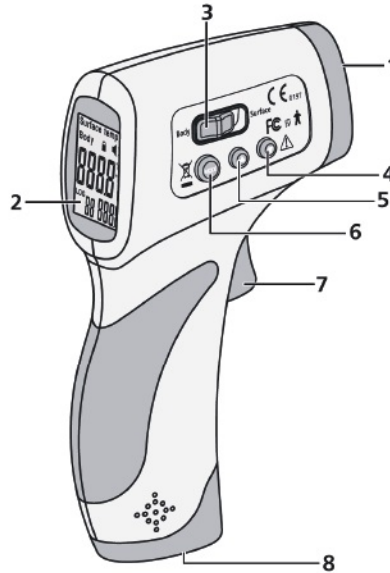

### Display

- 1- Indicatore di superficie
- 2- Indicatore di corpo umano
- 3- Misura
- 4- Batterie
- 5- Numero registrazione
- 6- Valore registrato
- 7- Temperatura
- 8- Allarme acustico



### Misura

1- Installare le batterie;

2- Alla prima accensione, o appena sostituite le batterie, consigliamo di **attendere 10 minuti di riscaldamento** prima di effettuare la misura;

3- Lo strumento all'accensione effettua un test sulla temperatura dell'ambiente, pertanto potrebbe ritardare la misura di qualche secondo;

4- **Puntare il termometro verso la fronte, ad una distanza di almeno 5 cm, e premere l'interruttore di misura.** La misura viene immediatamente mostrata a display.

Assicurarsi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il risultato.

5- Nel caso la temperatura dell'ambiente sia molto differente, o la fronte molto sudata, è possibile **misurare la temperatura nella parte posteriore dell'orecchio.**

Assicurarsi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il risultato.





**DOSTMANN electronic**

## **EU Declaration of Conformity**

It is herewith confirmed that the product designated below:

### **Infrared Thermometer BodyTemp 478 5020-0478**

conforms to the essential protection requirements as defined in the directive of the council for harmonising the statutory regulations of the member countries.

This declaration is valid for all individual devices manufactured according to the attached manufacturing documents, which belong to and are part of this declaration.

The following standard specifications have been applied for assessing the products with respect to quality assurance compatibility:

### **Directive 93/42/EEC ANNEX V Production Quality Assurance for medical devices**

This declaration is made in responsibility for the manufacturer / importer

Dostmann electronic GmbH  
Waldenbergweg 3b  
97877 Wertheim – Reicholzheim

issued by

Marc Hussy

Executive Vice President

Reicholzheim, Date:02.04.2020

  
(legally valid signature)